



爱家小哥TM
ProVista Care



老人智能手表
A2
BPC010

一. 安装 SIM 卡

请先准备一张移动或联通的Nano SIM卡，并确保该SIM卡：

1. 已开通来电显示。
2. 已开通上网功能，包月流量在30M以上。
(正常使用在30-100M之间)
3. 支持2G网络。

如为新购SIM卡请先安装到手机里激活或到营业厅激活。



图1

请如图1放置手表

1. 打开手表SIM卡盖。
2. 向上掀开贴片打开卡槽，芯片朝下，按照SIM卡缺角对应位置放入其中。
3. 放置好SIM卡后，向下合住贴片，再向右推动固定好SIM卡。
4. 最后装好手表后盖。

二. 给手表充电并开机

将充电线连接手表和充电头（5V），成功开始充电后屏幕会短时点亮。



图2

长按手表电源键3秒开机，长按8秒可强制关机。
短按电源键可挂机或返回上一级。
长按SOS键3秒，可发起紧急呼叫。

三. 下载安装爱家小哥APP

扫描下方二维码下载并安装手机APP。



您也可以访问provista-care.com或者在应用市场中搜索“爱家小哥A”下载安装。

请您根据提示完成注册，并使用已注册的手机号登录APP。

设备要求：支持iOS 8 以上，安卓4.4以上。

四. 添加智能手表完成绑定

打开“爱家小哥”手机App，点击“添加设备”按钮，扫描SIM卡盖背后的二维码，即可完成与手机的绑定操作。

第一个绑定手表的用户将成为手表管理员，手表管理员有权在手机App中添加或删除联系人。

其他联系人可通过以下步骤绑定此手表：

1. 通过管理员在其手机App中添加，“功能” - “通讯录”添加。
2. 扫描二维码进行绑定，管理员在APP中确认通过即可。手表的所有设置均需管理员在手机APP中的“功能”栏目设置。

五. 注意事项

1. 手表主体内含电池，请勿靠近电源或将其投入火中，避免起火危险。
2. 皮肤过敏者在天气较热和潮湿环境下，请勿长时间过紧的配戴表带，可能会引起皮肤不透气产生的皮疹或瘙痒。
3. 建议使用输出5V-0.5A MAX的充电器对手表进行充电。
4. 请与心脏起搏器等保持至少60CM的距离。

5. 请勿将产品浸泡或冲洗。
6. 请将产品远离火源、高温高热等极端环境。
7. 国内版本仅限使用中国大陆地区的 SIM 卡，服务仅限于中国大陆地区。若要在国外使用，请购买国际版。
8. 本手表在断电状态和服务区外时，定位功能无法工作。
9. 设备二维码作为添加手表的唯一标识请妥善保管。

六. 产品功能及参数

功能/型号	A2
跌倒自动警报	√
SOS一键呼救	√
多重定位	GPS、WiFi、LBS
双向语音通话	√
心率检测	√
电子围栏	√
远程监听	√
通讯录	30个号码（含3个SOS号码）
显示屏	0.96吋TFT触摸屏
时间日期天气显示	√

运动计步	√
微聊（限语音）	√
运营商/SIM卡支持	移动/联通；Nano-SIM
电话/数据业务及流量	2G/GPRS；30-100M/月
电池规格及工作时长	400mAh/待机约2~3天
充电方式	5V/0.5A（磁吸式USB充电线）
温度范围	“工作” -10/+50℃；“存储” -20/+60℃
防水级别	IPX4（普通生活防水）

免责声明

1. 在本说明书编制过程中已经力求内容的正确与完整，但并不保证本说明书没有任何错误或漏失。
2. 我司拥有不需声明即可对本产品之软件及硬件做任意修改的权利。
3. 未经我司事先书面授权下，不得以任何形式对本说明书的任何部分进行复制，传输，转录或保存于可检索的系统中，或翻译成任何语言文字。
4. 我司对于因本产品，软件，个人计算机及周边设备的错误操作或故障，对SIM卡造成的数据损坏或遗失所导致之损失概不负责。

5. 我司的产品，会使用无线及网络，因干扰或网络原因等造成的任何损失，我司概不负责。
6. 我司的产品所提供的信息只供提醒及参考，我司不对因产品所提供的信息错误，遗漏，外泄等承担任何责任。
7. 我司的产品力求功能稳定，质量可靠。若在使用过程中发现有任何质量问题，请及时联系我售后服务部处理。我司只对产品本身负责，不对产品本身以外的任何损失负责。

制造商：保力新能源科技（东莞）有限公司

服务电话：400 8303 680

服务邮箱：xiaoge@precisionhk.com

公司网址：<http://www.provista-care.com/>

地址：广东省东莞市石排镇向西工业区保力工业园